

Büthner-Frank GmbH
Am Wolfsmantel 9-11
91058 Erlangen



Gebrauchsanweisung für

NISSENKAMM

aus Metall



Gebrauchsanweisung:

Mit dem Büttner-Frank Nissenkamm entfernen Sie schnell und gründlich Läuse und Nissen. Kämmen Sie Ihr Haar zunächst mit einer herkömmlichen Frisierkamm gründlich durch und töten Sie herausgekämmte Läuse sofort ab, um weiteren Befall zu vermeiden. Bedecken Sie Ihre Schultern mit einem hellen Handtuch oder ähnlichem, um herabfallende Läuse besser zu erkennen.

Waschen Sie Ihr Haar danach mit einem geeigneten Spezial-Shampoo (erhältlich in Ihrer Apotheke).

Setzen Sie jetzt die Zähne des Büttner-Frank Nissenkamms möglichst dicht an der Kopfhaut an und kämmen Sie in ca. 5 cm breiten Strähnen Nissen und Läuse aus dem Haar.

Achten Sie unbedingt darauf, daß sich gereinigtes und ungereinigtes Haar nicht wieder vermischen und daß das Haar immer feucht ist.

Säubern Sie Ihren Nissenkamm mit beiliegendem Kammreiniger.

Sollte Ihre Kopfhaut entzündet oder wund sein, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf.

NISSENKAMM (aus Metall)

Best.-Nr. 102170 PZN 475580 1